

超音波スケーラー

osada ENAC 10WA

オサダエナック10WA



ライト付の
超音波治療器

ゴルツチップにも対応！
豊富なチップで多目的な治療が行えます！



先端ライト付き

ハンドピースの先端に内蔵されたリングライトが動物の口腔内を明るく照らし、快適で確実な処置が行えます。

抜歯も出来る

豊富なアクセサリーチップを取り揃えており、**ゴルツ5兄弟**を使用すれば抜歯にも威力を発揮します。

軽量コンパクト

ホースはワンタッチで取り外しができます。ボトル給水式で手術室・処置室等へ楽に移動できます。

商品名	形式	商品コード	標準価格
オサダエナック10WA	OE-10WA	3239	¥286,000

チップ(標準装備)

歯頸部・歯間部の歯石除去



ST08チップ

歯肉縁上の硬い歯石除去



ST14チップ

パワーアップタイプで
歯肉縁下2~3mmの歯石除去も



ST35チップ

商品名	商品コード	標準価格
ST08チップ	78435	¥5,720
ST14チップ	85725	¥5,720
ST35チップ	72990	¥5,720

<仕様>

- 電源: 電源電圧 交流100V、電源周波数50/60Hz、電源入力0.3A
- クラス分類: 一般医療機器 ■質量: 本体3.2kg
- パワー設定: 0.1~10
- 寸法: 本体W214×D205×H105mm
- 確認番号: 19-3187号

●表示価格は消費税抜きの価格です。消費税は別途申し受けます。
●商品の仕様・価格は改良の為、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。ご不明な点は下記までお問い合わせ下さい。
ご使用の際には、商品に添付の添付文書・取扱説明書を必ずお読み下さい。

No. 1201

販売元



株式会社オサダメディカル

〒141-8517 東京都品川区西五反田5-17-5
TEL 03 (3492) 2874 (代)
FAX 03 (3492) 3021

http://www.osada-electric.co.jp

製造販売元: 長田電機工業株式会社



拔牙が安全・確実・スムーズに ゴルツチップ ST70・ST71・ST90 ST110・ST111

歯根膜の剥離に最適なチップ！

ゴルツ5兄弟

新発売

待望の新型チップ発売！！

ST110チップ

ST111チップ

従来の拔牙では、エレベーター操作に技量が必要で、無理をすれば歯根破折や歯肉裂開を招く恐れがありました。

- ゴルツチップは超音波の力を利用し、歯根膜繊維自体または歯根膜を切離し、歯槽骨と歯根面の間に隙間を作ることができます。
- オートクレーブ滅菌対応！

ST70チップ (曲)



超音波の振幅が大きく、歯根膜の切離・剥離に威力を発揮します。

ST90チップ (曲細)



犬の切歯やネコの全歯に最適
刃部がS字で引く動作がし易い

ST71チップ (曲長)



刃先が長く、奥深くまで挿入可能です。

NEW

ST110チップ (直)



適用：犬・犬歯、臼歯

NEW

ST111チップ (直細)



適用：犬・切歯 猫・全歯

ST110チップとST111チップ

- ・刃部は直線形状であり、刺入する操作がし易いです。
- ・刃先は、刃元からまっすぐ先の位置であり、根尖を狙った操作がし易いです。
- ・剥離操作面が広く取れる為、剥離後のエレベーター操作が楽になります。


ゴルツチップのご使用方法・拔牙の手順は
HPに掲載されていますのでご参照下さい。

HPはこちら→

検索

株式会社オサダメディカル
<http://www.osada-medical.co.jp>

模式図

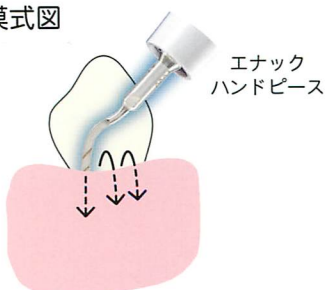

※多根歯は分割して行なって下さい。

● ご使用方法 ●

- ① 振動をスタートさせ、ゴルツチップを歯根面に沿わせて、上下させながら押し込んで下さい。ひねり等、横方向の力を加えないで下さい。チップの変形、破損につながります。
- ② 剥離を確認した後、引き抜いて位置をずらして歯牙の周りを一周して下さい。
- ③ エレベーターと併用してご使用下さい。

● ご使用上の注意点 ●

- ・必ず注水して下さい。
- ・オサダエナックシリーズに装着してお使い下さい。
- ・パワーは、5～7に設定して下さい。



OSADA MEDICAL

商品名	商品コード	標準価格
ST70チップ	51095	¥14,300
ST71チップ	51096	¥14,300
ST90チップ	52083	¥14,300
ST110チップ	53176	¥14,300
ST111チップ	53177	¥14,300